

**seni**<sup>®</sup>



 **TZMO SA**  
tzmo-global.com  
seni-global.com

TZMO Austria GmbH, Wienerbergstraße 11/12A, A-1100 Wien  
Tel. +43 (1) 994 6064 14, info@tzmo.at  
[www.tzmo.at](http://www.tzmo.at)



## Was ist Blasenschwäche?

**Blasenschwäche bezeichnet eine Funktionsstörung der Blase, bei der es zu einem unwillkürlichen Harnverlust kommt.**




Allgemein wird oft angenommen, Blasenschwäche träte nur bei älteren Menschen auf und betraf lediglich Frauen. Beides ist falsch. Die Symptomatik einer Inkontinenz kann bei Menschen in jedem Alter auftreten, sowie beide Geschlechter betreffen. Wussten Sie, dass jede 4. Frau und jeder 8. Mann unter Inkontinenz leiden?

Blasenschwäche ist keine eigenständige Krankheit, sondern eine Begleiterscheinung oder Folgeerkrankung. Verschiedene Faktoren können diese auslösen oder fördern. Die häufigsten allgemeinen Ursachen von Inkontinenz sind Schwächung der Becken- oder Blasenmuskulatur, Blasen- und Harnwegsentzündungen und starkes Übergewicht. Geschlechterspezifisch können bei Frauen Schwangerschaft, Geburt und Wechseljahre Inkontinenz auslösen, bei Männern Prostatavergrößerung. Seltener sind schwere Erkrankungen die Ursache, darunter fallen Tumore, Verletzungen im Gehirn oder Rückenmark, Alzheimer, Parkinson, Diabetes oder psychische Störungen. Inkontinenz kann auch infolge von chirurgischen Eingriffen oder Medikamenteneinnahme auftreten. Für eine richtige Behandlung ist es von elementarer Wichtigkeit, durch Untersuchungen herauszufinden, welche Ursache vorliegt.

**Inkontinenz ist keine reine Alterserkrankung.  
Sie ist weit verbreitet und kann jeden betreffen!**

## Abstufungen

Neben den unterschiedlichen Formen tritt Blasenschwäche auch in verschiedenen Schweregraden auf. Man unterscheidet diese gemäß der Menge des unkontrollierten Harnverlustes. Um die richtige Behandlung und optimalen Hilfsprodukte für die jeweilige Stufe zu wählen, dient folgende Einstufung zur Orientierung:

INKONTINENZSTUFE	LEICHT	MITTEL	SCHWER
Uhrmenge, die unkontrolliert innerhalb von 4 Stunden ausgeschieden wurde	 BIS 100 ml	 100-200 ml	 ÜBER 200 ml

## Eigenschaften der Inkontinenzprodukte von Seni

PREMIUM QUALITY



### Atmungsaktiv – die Luft kann zirkulieren



Die Außenseite der Seni Produkte aus einem speziellen dampfdurchlässigen Material lässt die Haut frei atmen, hält jedoch Flüssigkeiten sicher im Inneren des Produktes.

### Ein angenehm trockenes Gefühl



Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern und so für ein angenehm trockenes Gefühl.\*

### Diskretion und Komfort



Die besonders weiche und sanfte Außenseite ist absolut geräuschneutral und bietet so Diskretion und Tragekomfort.

### Verhindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen



Odour Stop ist eine Bezeichnung für die Eigenschaft des in den Inkontinenzprodukten verwendeten Superabsorbers, der die Entstehung des unangenehmen Geruchs verhindert.

### Das Risiko von Allergien wird minimiert



Produkte mit dieser Bezeichnung haben keine Latexelemente. Stattdessen wurde ein elastisches Garn verwendet, wodurch das Risiko von Allergien minimiert wird. Die Produkte von Seni können so ohne Bedenken von Personen verwendet werden, die gegen Latex allergisch sind.

### Anatomische Passform



Die spezielle Form der Produkte von Seni ermöglicht eine optimale Anpassung an den Körper. So genießt der Betroffene die volle Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und Diskretion.

\* kein EDS bei Seni Lady Micro, Seni Man Super, San Seni Alivi, Seni V, Seni Classic und Seni Standard Air.



# Seni Lady



## Atmungsaktive, anatomisch geformte Einlagen für Frauen



Micro	Mini	Mini Plus	Normal

- Der Superabsorber im Saugkissen neutralisiert unangenehme Gerüche
- Das Extra Dry System\* nimmt die Flüssigkeit schnell auf und verteilt sie optimal
- Die Seitenbündchen\* bieten zusätzliche Sicherheit
- Einfache Fixierung in der Unterwäsche dank dem breiten Haftstreifen
- Mit weicher und geräuschneutraler Oberfläche

\*nicht bei der Größe Micro


Extra	Extra Plus	Super	Plus

LEICHT MITTEL INKONTINENZ

Produkt	Index	Größe (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Micro	SE-095-MC20-G01	7 x 18,5	20	16
Mini	SE-095-MI20-G01	9,5 x 22,5	20	20
Mini Plus	SE-095-MP20-G01	10 x 25,5	20	20
Normal	SE-095-NO20-G01	10,5 x 28	20	20
Extra	SE-095-EX15-G01	14 x 29,5	15	16
Extra Plus	SE-095-EP15-G01	15 x 33	15	16
Super	SE-095-SU15-G01	18 x 37	15	16
Plus	SE-095-PL15-G01	20,5 x 42	15	16

**Tipp:** Die Seni Lady Inkontinenzeinlagen sind, dank ihrer speziellen Konstruktion, saugfähiger als herkömmliche Damenbinden, weshalb sie besser für inkontinente Personen geeignet sind.

Anwendung:

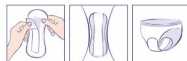

LEICHT MITTEL INKONTINENZ



## Atmungsaktive, anatomisch geformte Einlagen für Männer



- Speziell an die männliche Anatomie angepasste Form
- Der Superabsorber im Saugkissen neutralisiert unangenehme Gerüche
- Das Extra Dry System nimmt die Flüssigkeit schnell auf und verteilt sie optimal\*
- Die Seitenbündchen bieten zusätzliche Sicherheit
- Einfache Fixierung in der Unterwäsche dank dem breiten Haftstreifen

Produkt	Index	Größe (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Normal	SE-095-MN15-003	21,5 x 28,5	15	8
Extra	SE-095-EX15-003	21,5 x 28,5	15	12
Super	SE-095-SU10-003	9 x 40	10	12
	SE-095-SU20-003		20	6

### Anwendung:








## Atmungsaktive, anatomisch geformte Vorlagen

- Der spezielle Superabsorber im doppelten Saugkissen\* neutralisiert unangenehme Gerüche
- Das Extra Dry System nimmt die Flüssigkeit schnell auf und verteilt sie optimal
- Die seitlichen Auslaufsperrn bieten zusätzliche Sicherheit
- Der doppelte Nässeindikator informiert über den Wechselbedarf



### Tipp:

Mit Seni Fix Fixierhöschen zu tragen - eine ideale Anpassung an den Körper, auch bei Personen mit Übergewicht.

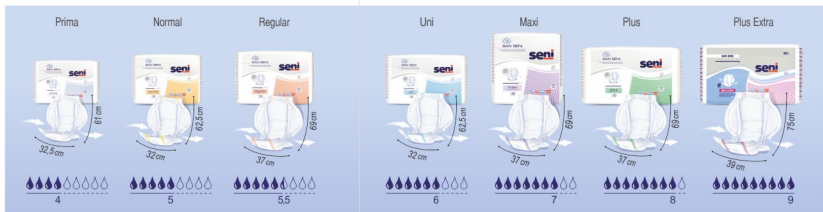


Produkt	Index	Größe (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Prima	SE-093-PR30-001	32,5 x 61	30	4
Normal	SE-093-NO10-001	32 x 62,5	10	8
	SE-093-NO30-001		30	4
Regular	SE-093-RE30-001	37 x 69	30	3
Uni	SE-093-UN10-004	32 x 62,5	10	8
	SE-093-UN30-001		30	4
Maxi	SE-093-MA10-001	37 x 69	10	8
	SE-093-MA30-001		30	3
Plus	SE-093-PL10-001	37 x 69	10	8
	SE-093-PL30-001		30	3
Plus Extra	SE-093-PX30-001	39 x 75	30	3

\* bei der Größe Prima ein einfaches Saugkissen mit Superabsorber

### Achtung!

Vor Gebrauch das Produkt aktivieren – entfallen, mehrmals energisch spannen, der Länge nach zusammenfalten und mit der Hand über die Falte fahren.

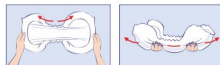

### Anwendung:

#### im Stehen:



#### bei bettlägerigen Personen:





## San Seni for Men



Atmungsaktive, anatomisch geformte Vorlagen für Männer



- Speziell an die männliche Anatomie angepasste Form
- Breiter Saugkern im vorderen Bereich bindet die Flüssigkeit und neutralisiert unangenehme Gerüche
- Seitliche Auslaufsperrn bieten zusätzliche Sicherheit



Produkt	Index	Größe (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
San Seni for Men	SE-093-FM30-001	38 x 69	30	3



## San Seni Alvi



Atmungsaktive, anatomische Stuhlvorlage

- Angepasste Saugkraft und Fläche – keine Überversorgung
- Seitliche Auslaufsperrn halten den Stuhl sicher in der Vorlage



### Achtung!

Nur bei Stuhlinkontinenz oder Patienten mit Dauerkatheter geeignet, nicht als Schutz bei Harninkontinenz geeignet

Produkt	Index	Größe (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
San Seni Alvi	SE-093-AL30-001	37 x 69	30	6



## Seni V



Atmungsaktive saugstarke Vliesvorlagen

- Empfohlen als zusätzliches Saugkissen bei Verwendung von Inkontinenzhosen, speziell bei gleichzeitiger Urin- und Stuhlinkontinenz
- Saugkissen mit antibakteriellem Superabsorber – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche

### Achtung!

Produkt ohne Isolationsschicht – nicht als einzigen Schutz bei Harninkontinenz verwenden



Produkt	Index	Größe (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Normal	SE-093-NO30-V03	32 x 62,5	30	4
Maxi	SE-093-MA30-003	37 x 69	30	4





## Seni Fix – Elastische Fixierhöschen

Ideal zur Fixierung von anatomisch geformten Vorlagen (San Seni) und größeren Einlagen (Seni Lady).

- Elastisch – für eine optimale Anpassung an den Körper, auch bei Personen mit Übergewicht
- Waschbar und trocknergeeignet
- Latexfrei und besonders hautfreundlich



- **Seni Fix Plus** – Netzhöschen aus weitmaschigem Material mit außenliegenden Seitennähten (25 mal waschbar).



Produkt	Index	Tailienweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Medium	SE-092-ME05-001	70 - 95	5	100
Large	SE-092-LA05-001	80 - 120	5	100
X-Large	SE-092-XL05-001	90 - 130	5	100
2X-Large	SE-092-2X05-001	100 - 155	5	100

- **Seni Fix Panty** – Sehr leichte und weiche Fixierhöschen mit verlängertem Beinansatz (25 mal waschbar).



Produkt	Index	Tailienweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Medium	SE-092-ME05-002	70 - 90	5	100
Large	SE-092-LA05-002	85 - 110	5	100
X-Large	SE-092-XL05-002	105 - 130	5	100

- **Seni Fix Comfort** – Unterwäscheähnliche Fixierhöschen ohne Seitennähte aus dichtem, engmaschigem und weichem Material (100 mal waschbar).



Produkt	Index	Tailienweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-092-SM05-003	65 - 100	5	20
Medium	SE-092-ME05-003	70 - 110	5	20
Large	SE-092-LA05-003	75 - 120	5	20
X-Large	SE-092-XL05-003	80 - 130	5	20
2X-Large	SE-092-2X05-003	85 - 140	5	20
3X-Large	SE-092-3X05-003	120 - 165	5	20
4X-Large	SE-092-4X05-003	140 - 180	5	20

- **Seni Fix Comfort Lady** und **Seni Fix Comfort Man** – unterwäscheähnliche, farbige Fixierhöschen im attraktiven Design (100 mal waschbar).



Produkt	Index	Tailienweite (cm)	Farbe	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Lady	SE-092-ME02-LN3	70 - 110	Beige	2	8
	SE-092-ME02-LB3		Schwarz	2	8
Lady	SE-092-LA02-LN3	75 - 120	Beige	2	8
	SE-092-LA02-LB3		Schwarz	2	8
Man	SE-092-LA02-MB3	75 - 120	Schwarz	2	8
Man	SE-092-XL02-MB3	80 - 130	Schwarz	2	8



## Atmungsaktive, anatomische Vorlagen mit Hüftbund



- Das doppelte Anpassungssystem garantiert perfekte Anpassung und einen guten Sitz:
  - regulierbarer Hüftbund
  - elastische Vorder- und Rückseite
- Der Klettverschluss ermöglicht mehrmaliges Schließen und Öffnen
- Der spezielle Superabsorber im doppelten Saugkissen neutralisiert unangenehme Gerüche
- Das Extra Dry System nimmt die Flüssigkeit schnell auf und verteilt sie optimal
- Seitliche Auslaufperren bieten zusätzliche Sicherheit
- Der doppelte Nässeindikator informiert über den Wechselbedarf

### • Seni Optima • mittlere Inkontinenz

Produkt	Index	Talleneite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Medium	SE-097-ME10-001	70 - 105	10	8
Large	SE-097-LA10-001	80 - 125	10	6
Extra Large	SE-097-XL10-001	105 - 155	10	6

### • Seni Optima Plus • mittlere bis schwere Inkontinenz

Produkt	Index	Talleneite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Medium	SE-097-ME10-002	70 - 105	10	8
Large	SE-097-LA10-002	80 - 125	10	6
Extra Large	SE-097-XL10-002	105 - 155	10	6

### • Seni Optima Trio • schwere Inkontinenz

Produkt	Index	Talleneite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Medium	SE-097-ME10-003	70 - 105	10	8
Large	SE-097-LA10-003	80 - 125	10	6
Extra Large	SE-097-XL10-003	105 - 155	10	6

### Achtung!

Vor Gebrauch das Produkt aktivieren – entfallen, mehrmals energisch spannen, der Länge nach zusammenfallen und mit der Hand über die Falte fahren.



### Anwendung:

im Stehen:



bei bettlägerigen Personen:



**BALD IN NEUEN**  
Verpackungen





## Atmungsaktive, elastische Inkontinenzeinmalhosen



- Wie Unterwäsche an- und ausziehbar
- Aufreißbare Seitennähte für einfaches Ausziehen
- Weicher, elastischer Hüft- und Tailenbereich
- Der spezielle Superabsorber im Saugkissen neutralisiert unangenehme Gerüche
- Das Extra Dry System nimmt die Flüssigkeit schnell auf und verteilt sie optimal
- Seitliche Auslaufsperrn bieten zusätzliche Sicherheit
- Der Nässeindikator informiert über den Wechselbedarf\*

### • Seni Active Normal • mittlere Inkontinenz

Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-096-SM10-N01	55 - 85	10	8
	SE-096-SM30-N01		30	2
Medium	SE-096-ME10-N01	80 - 110	10	8
	SE-096-ME30-AN1		30	3
Large	SE-096-LA10-N01	100 - 135	10	8
	SE-096-LA30-AN1		30	3
Extra Large	SE-096-XL10-N01	120 - 160	10	8
	SE-096-XL30-N01		30	2

### • Seni Active Super • mittlere bis schwere Inkontinenz

Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-096-SM10-AS1	55 - 85	10	8
Medium	SE-096-ME10-AS1	80 - 110	10	8
Large	SE-096-LA10-AS1	100 - 135	10	8
Extra Large	SE-096-XL10-AS1	120 - 160	10	8

### • Seni Active Plus • schwere Inkontinenz

Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-096-SM10-A02	55 - 85	10	8
Medium	SE-096-ME10-A02	80 - 110	10	8
Large	SE-096-LA10-A02	100 - 135	10	8
Extra Large	SE-096-XL10-A02	120 - 160	10	8
2X-Large	SE-096-2X10-A02	140 - 190	10	4

\* nicht bei Seni Active Plus 2X-Large

### Anwendung:



Um gebrauchte Inkontinenzeinmalhosen zu entsorgen, reißen Sie die seitlichen Nähte an beiden Seiten auf. Der Klebstreifen auf der Rückseite ermöglicht das Zukleben des zusammengerollten Produktes und desselben eine hygienische und diskrete Entsorgung.\*





## Super Seni



### Atmungsaktive Inkontinenzhosen mit Klettverschlüssen




- Flexi 360° – Tragekomfort und sicherer Schutz:
  - geschlossenes System mit elastischen Tailleneinsätzen
  - doppelte und extra breite Klebeklettverschlüsse ermöglichen mehrmaliges Öffnen und Schließen
- Der Superabsorber im doppelten Saugkissen neutralisiert unangenehme Gerüche
- Das Extra Dry System nimmt die Flüssigkeit schnell auf und verteilt sie optimal
- Seitliche Auslaufsperrn bieten zusätzliche Sicherheit
- Der doppelte Nässeindikator informiert über den Wechselbedarf

#### • Super Seni • mittlere Inkontinenz

Produkt	Index	Taillenumfang (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Extra Small	SE-094-XS10-A01	40 - 60	10	12
	SE-094-SM10-A01		10	12
Small	SE-094-SM30-A01	55 - 80	30	3
	SE-094-ME10-A01		10	12
Medium	SE-094-ME30-A01	75 - 110	30	4
	SE-094-LA10-A01		10	6
Large	SE-094-LA30-A01	100 - 150	30	4
	SE-094-XL10-A01		10	6
Extra Large	SE-094-XL30-A01	130 - 170	30	4

#### Achtung!

Vor Gebrauch das Produkt aktivieren – entfallen, mehrmals energisch spannen, der Länge nach zusammenfalten und mit der Hand über die Falte fahren.

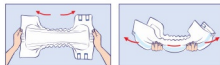

#### Anwendung:

im Stehen:



bei bettlägerigen Personen:





### • Super Seni Plus • mittlere bis schwere Inkontinenz

Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Extra Small	SE-094-XS10-A02	40 - 60	10	12
Small	SE-094-SM10-A02	55 - 80	10	12
	SE-094-SM30-A02		30	3
Medium	SE-094-ME10-A02	75 - 110	10	8
	SE-094-ME30-A02		30	3
Large	SE-094-LA10-A02	100 - 150	10	6
	SE-094-LA30-A02		30	3
Extra Large	SE-094-XL10-A02	130 - 170	10	6
	SE-094-XL30-A02		30	3
2X-Large	SE-094-2X10-A02	160 - 210	10	6

### • Super Seni Trio • schwere Inkontinenz

Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-094-SM10-A03	55 - 80	10	12
Medium	SE-094-ME10-A03	75 - 110	10	8
Large	SE-094-LA10-A03	100 - 150	10	6
Extra Large	SE-094-XL10-A03	130 - 170	10	6

### • Super Seni Quatro • sehr schwere Inkontinenz

Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-094-SM10-A04	55 - 80	10	12
Medium	SE-094-ME10-A04	75 - 110	10	8
Large	SE-094-LA10-A04	100 - 150	10	6
Extra Large	SE-094-XL10-A04	130 - 170	10	6



**NEU!**  
Super Seni Plus 2X-Large  
speziell für adipöse Patienten





## Atmungsaktive Inkontinenzhosen für Kinder

- Das doppelte Anpassungssystem garantiert Tragekomfort und einen guten Sitz:
  - ein breiter, elastischer Rückenabschluss
  - elastische Klebeklettverschlüsse zum mehrmaligen Öffnen und Schließen
- Seitliche Auslaufsperrn bieten zusätzliche Sicherheit
- Nässeindikator informiert über den Wechselbedarf
- Besonders weiche und geräuschneutrale Oberfläche



### Tipp:

Die Seni Kids Inkontinenzhosen sind der perfekte Schutz für Kinder mit Inkontinenz, die aus herkömmlichen Babywindeln herausgewachsen sind.

In 2 Größen erhältlich

### • Seni Kids



Produkt	Index	Gewichtsspanne (kg)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Junior	SE-094-JU30-A01	11 - 25	30	5
Junior Extra	SE-094-JX30-A01	15 - 30	30	5

### Achtung!

Vor Gebrauch das Produkt aktivieren – entfalten, mehrmals energisch spannen, der Länge nach zusammenfallen und mit der Hand über die Falte fahren.



### Anwendung:

im Stehen:



bei bettlägerigen Kindern:







**Seni Soft Super Dry** und **Seni Soft Super** Bettschutzunterlagen helfen das Bett frisch und hygienisch sauber zu halten, besonders bei bettlägerigen Inkontinenten.

## Seni Soft Super Dry



Atmungsaktive extra saugstarke Bettschutzunterlagen mit Superabsorber

- Extrem saugfähiger Kern aus Zellstoff-Flocken und Superabsorber
- Unterseite aus atmungsaktivem Material
- Extra weiche Vliesoberfläche



Produkt	Index	Größe (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Seni Soft Super Dry	SE-091-SU15-003	90 x 60	15	4



**Seni Soft Super**



Saugstarke Bettschutzunterlagen

- Saugfähiger Kern aus Zellstoff-Flocken
- Oberfläche aus weichem Vliesstoff
- Unterseite aus feuchtigkeitsundurchlässiger und rutschfester Folie



Produkt	Index	Größe (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Seni Soft Super	SE-091-SU05-001	40 x 60	5	24
	SE-091-SU30-001		30	4
	SE-091-SU05-002	60 x 60	5	24
	SE-091-SU30-002		30	4
	SE-091-SU05-003	90 x 60	5	12
	SE-091-SU30-003		30	4
	SE-091-SU50-003		50	1
	SE-091-SU30-004	90 x 170 (mit Seitenfalten)	30	4

Anwendung:





## Seni Control

URO Protect

AIR  
HYPOALLERGEN

STOP

EDS

latex  
FREE


### Atmungsaktive Einlagen für Frauen und Männer



- Der Superabsorber im Saugkissen neutralisiert unangenehme Gerüche
- Das Extra Dry System nimmt die Flüssigkeit schnell auf und verteilt sie optimal
- Die Seitenbündchen bieten zusätzliche Sicherheit
- Einfache Fixierung in der Unterwäsche dank dem breitem Haftstreifen



### - Seni Control

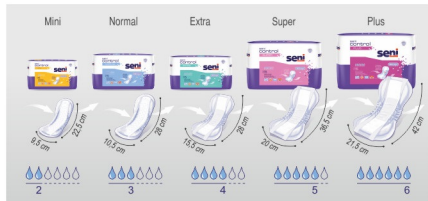

Produkt	Index	Größe (cm)	Sik. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Mini	SE-095-MI15-SC1	9,5 x 22,5	15	16
Normal	SE-095-NO15-SC1	10,5 x 28	15	16
Extra	SE-095-EX15-SC1	15,5 x 28	15	16
Super	SE-095-SU15-SC1	20 x 36,5	15	16
Plus	SE-095-PL15-SC1	21,5 x 42	15	16

AIR  
HYPOALLERGEN

STOP

EDS

latex  
FREE

## San Seni Basic




### Atmungsaktive, anatomisch geformte Vorlagen



- Offenes System ohne hüftumfassende Seitenflügel – garantiert vollste Bewegungsfreiheit
- Fixierung mit Hilfe von speziellen, elastischen Seni Fix Höschen – ideale Anpassung an den Körper, auch bei Personen mit Übergewicht
- Saugkissen mit Superabsorber – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche
- Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz
- Nässeindikator – informiert über den Wechselbedarf

### - San Seni Basic

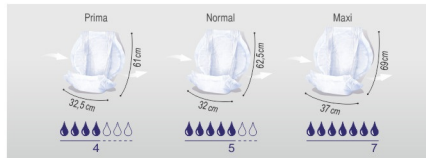

Produkt	Index	Größe (cm)	Sik. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Prima	SE-093-PR30-B01	32,5 x 61	30	4
Normal	SE-093-NO30-B01	32 x 62,5	30	4
Maxi	SE-093-MA30-B01	37 x 69	30	3



## Seni Active Classic



### Atmungsaktive Inkontinenzslips



- Wie gewöhnliche Unterwäsche an- und ausziehbar – praktisch und komfortabel
- Aufreißbare Seitennähte – einfache Entsorgung des gebrauchten Produktes
- Saugkissen mit Superabsorber – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche
- Flüssigkeitsabweisender seitlicher Auslaufschutz
- Nässeindikator – informiert über den Wechselbedarf
- Erhöhter Schutz für besonders aktive Personen

### Seni Active Classic



Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-096-SM30-C01	55 - 85	30	2
Medium	SE-096-ME10-C01	80 - 110	10	8
	SE-096-ME30-AC1		30	3
Large	SE-096-LA10-C01	100 - 135	10	8
	SE-096-LA30-AC1		30	3
Extra Large	SE-096-XL10-C01	120 - 160	10	8
	SE-096-XL30-C01		30	2



## Seni Classic



### Atmungsaktive Inkontinenzhosen

- Seitenflügel aus weichem, atmungsaktivem Vlies und dampfdurchlässiger Mittelteil
- Doppelte Klebeklettverschlüsse – ermöglichen mehrmaliges Öffnen und Schließen
- Doppeltes Saugkissen mit Superabsorber – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche
- Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz
- Nässeindikator – informiert über den Wechselbedarf

### Seni Classic - mittlere Inkontinenz



Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-094-SM30-SC1	55 - 80	30	4
Medium	SE-094-ME30-SC1	75 - 110	30	4
Large	SE-094-LA30-SC1	100 - 150	30	4
Extra Large	SE-094-XL30-SC1	130 - 170	30	4

### Seni Classic Plus - mittlere bis schwere Inkontinenz



Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-094-SM30-SC2	55 - 80	30	3
Medium	SE-094-ME30-SC2	75 - 110	30	4
Large	SE-094-LA30-SC2	100 - 150	30	3
Extra Large	SE-094-XL30-SC2	130 - 170	30	3



• Seni Classic Trio • sehr schwere Inkontinenz



Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-094-SM30-SC3	55 - 80	30	3
Medium	SE-094-ME30-SC3	75 - 110	30	3
Large	SE-094-LA30-SC3	100 - 150	30	2
Extra Large	SE-094-XL30-SC3	130 - 170	30	2



## Inkontinenzhosen mit atmungsaktiven Seitenflügeln

- Inkontinenzhosen mit Seitenflügeln aus weichem und atmungsaktivem Vlies
- Doppeltes Saugkissen mit Superabsorber – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche
- Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz
- Nässeindikator – informiert über den Wechselbedarf



• Seni Standard Air • mittlere Inkontinenz



Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-094-SM30-SA1	55 - 80	30	4
	SE-094-ME10-SA1		10	9
Medium	SE-094-ME30-SA1	75 - 110	30	4
	SE-094-LA10-SA1		10	9
Large	SE-094-LA30-SA1	100 - 150	30	4
	SE-094-XL30-SA1		30	4
Extra Large	SE-094-XL30-SA1	130 - 170	30	4

• Seni Standard Plus Air • mittlere bis schwere Inkontinenz



Produkt	Index	Tailenweite (cm)	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
Small	SE-094-SM30-SA2	55 - 80	30	3
Medium	SE-094-ME30-SA2	75 - 110	30	4
Large	SE-094-LA30-SA2	100 - 150	30	3
Extra Large	SE-094-XL30-SA2	130 - 170	30	3



**Seni Soft Normal** und **Seni Soft Basic** Bettschutzunterlagen helfen das Bett frisch und hygienisch sauber zu halten, besonders bei bettlägerigen Inkontinenten.

## Seni Soft Normal und Seni Soft Basic

### Saugstarke Bettschutzunterlagen

- Saugfähiger Kern aus Zellstoff-Flocken
- Oberfläche aus weichem Vliesstoff
- Unterseite aus feuchtigkeitsundurchlässiger und rutschfester Folie

#### Seni Soft Normal



Größe (cm)	Index	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
40 x 60 cm	SE-091-SN30-001	30	8
60 x 60 cm	SE-091-SN30-002	30	4
90 x 60 cm	SE-091-SN30-003	30	4
	SE-091-SN50-D03	50	1

#### Seni Soft Basic



Größe (cm)	Index	Stk. je Einzelverpackung	Verpackungsmenge je Karton
40 x 60 cm	SE-091-B010-001	10	24
	SE-091-B030-001	30	4
	SE-091-B010-002	10	16
60 x 60 cm	SE-091-SB30-002	30	4
	SE-091-B010-003	10	12
90 x 60 cm	SE-091-B030-003	30	4
	SE-091-SB50-D03	50	1


## Zusatzangebot

### Geruchsneutralisator

- Entfernt dauerhaft Gerüche
- Deoplex® beschleunigt den Zerfall von Geruchsmolekülen
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft



Produkt	Index	Inhalt	Verpackungsmenge je Karton
Geruchsneutralisator	SE-981-B500-002	500 ml	12

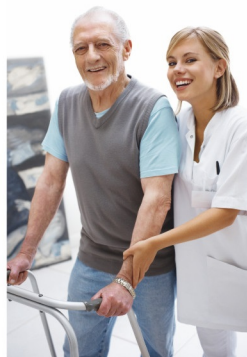



## Seni Care

### Medizinische Hautpflege für empfindliche Haut

#### Urin und Stuhl belasten die Haut von Inkontinenzbetroffenen

Im Laufe der Jahre wird die Haut dünner, trockener und reagiert empfindlicher auf die Wirkung reizender Substanzen. Durch die Schwächung des Hydrolipidmantels verliert die Haut ihre natürliche Elastizität und ein unangenehmes Spannungsgefühl ist häufig die Folge. Die richtige Pflege kann die Beschwerden bei empfindlicher Haut mindern und sie wirksam vor äußeren Einflüssen schützen.

#### Vorbeugen ist besser als Heilen!

Die Pflegeserie Seni Care wurde speziell für die Bedürfnisse empfindlicher Haut entwickelt. Dank der Verbindung der neuesten Technologien mit bewährten Rezepturen und ausgewählten Aktivstoffen, wirken die Pflegeprodukte von Seni Care sanft und effektiv. Alle Produkte der breitgefächerten Pflegeserie sind aufeinander abgestimmt und durch die praktische Pumpflasche einfach in der Handhabung.

**Sanfte Reinigung**

**EIGENSCHAFTEN DER SENI CARE PFLEGEPRODUKTE**

**BIOCOMPLEX AUS LEINEN** Leinsamenextrakt mit einer nährenden und lindernenden Wirkung.

**DERMATOLOGISCH GETESTET** – auch bei besonders empfindlicher Haut empfohlen.

**pH 5** Ein neutraler und hautfreundlicher pH-Wert.

**SINODOR®** Substanz mit einer geruchsneutralisierenden Wirkung.

**Wirksamer Schutz**

**Regeneration**



## SANFTE REINIGUNG

PRODUKTE ZUR WÄSCHE MIT WASSER



Zu der täglichen Pflege gehört natürlich die Reinigung der Haut. Die Seni Care Pflegeprodukte beinhalten aufeinander abgestimmte und besonders hautfreundliche Aktivstoffe, mit reinigender, regenerierender und schützender Wirkung.



#### 1. FEUCHTIGKEITSSPENDENDES SHAMPOO **3% UREA**

Feuchtigkeitspendendes Shampoo, macht die Haare geschmeidig und verleiht ein gesundes Aussehen.

#### 2. CREMEDUSCHE **3% UREA**

Die sanfte Cremedusche pflegt trockene Haut und spendet ihr Feuchtigkeit.

#### 3. RÜCKFETTENDE WASCHLOTION

Reinigt und nährt die trockene Haut, mit neutralem pH Wert.

Produkt	Index	Inhalt	Verpackungsmenge je Karton
① Feuchtigkeitspendendes Shampoo 3% UREA	SE-231-B500-152	500 ml	12
② Cremedusche 3% UREA	SE-231-B300-142	300 ml	12
③ Rückfettende Waschlotion	SE-231-B500-112	500 ml	12



## SANFTE REINIGUNG

PRODUKTE ZUR WÄSCHE OHNE WASSER



### 1. WASCHEM 3 in 1 **3% UREA SINODOR®**

Reinigt sanft, pflegt und schützt den natürlichen Hydrolipidmantel der Haut. Eliminiert den Uringerruch.

### 2. HAUTREINIGUNGS- UND PFLEGESCHAUM SINODOR®

Handlich bei Kranken oder Bettlägerigen, geeignet für eine sanfte Reinigung des Gesäß- und Intimbereiches. Eliminiert den Uringerruch.

### 3. SHAMPOO-SCHAUM

Reinigt sanft ohne Wasser, verleiht dem Haar einen gesunden Glanz und neutralisiert unangenehme Gerüche – ohne Ausspülen.

### 4. FEUCHTTÜCHER

Extra groß. Für eine sanfte Reinigung des Gesäß- und Intimbereiches, sowie des gesamten Körpers, z. B. während Reisen.

### 5. FEUCHTTÜCHER SENSITIVE

Reinigen sanft, erfrischen und pflegen gereizte und empfindliche Haut. Beugen Hautirritationen vor.

Produkt	Index	Inhalt	Verpackungsmenge je Karton
① Waschcreme 3 in 1 (3 % UREA)	SE-231-B01L-132	1000 ml	6
② Hautreinigungs- und Pflegeschäum	SE-231-P500-122	500 ml	12
③ Shampoo-Schaum	SE-231-B200-160	200 ml	12
④ Feuchttücher	SE-231-WK60-001	80 Stk.	8
⑤ Feuchttücher Sensitive	SE-231-WK68-S01	68 Stk.	8

## REGENERATION



Die Haut ist in jedem Alter Umwelteinflüssen ausgesetzt. Besonders trockene und gereizte Haut, sowie die empfindliche Haut der älteren Menschen ist anfällig für äußere Schädigungen. Seni Care ermöglicht der Haut gesund zu sein.



### 1. FEUCHTIGKEITSSPENDENDE KÖRPEREMULSION **4% UREA**

Lässt die Haut weich und glatt erscheinen und strafft sie. Die Emulsion hat eine leichte Konsistenz und lässt sich leicht verteilen.

### 2. PFLEGENDE HANDCREME **3% UREA**

Nährt und glättet die Hände, macht sie samt weich und schafft eine Schutzschicht. Besonders empfohlen für Hände die ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

### 3. PFLEGENDE FUßCREME **7% UREA SINODOR®**

Die Fußcreme macht die Haut elastisch und beugt Rissen an den Fersen vor.

### 4. CREME FÜR TROCKENE UND RAUE HAUT **10% UREA**

Spendet intensive Feuchtigkeit und fettet dort ein, wo die Haut trocken und zu Keratoseaufbau neigt, z.B. an Knien, Ellbogen, Fersen etc.

Produkt	Index	Inhalt	Verpackungsmenge je Karton
① Feuchtigkeitsspendende Körperemulsion 4% UREA	SE-231-B500-232	500 ml	12
② Pflegende Handcreme 3% UREA	SE-231-T075-262	75 ml	12
③ Pflegende Fußcreme 7% UREA	SE-231-T075-272	75 ml	12
④ Creme für trockene und raue Haut 10% UREA	SE-231-T100-252	100 ml	12

# REGENERATION



## 1. REGENERIERENDER PFLEGEBALSAM FÜR TROCKENE HAUT

Die erfrischenden Inhaltsstoffe im Balsam spenden Feuchtigkeit, glätten die Haut und lassen sie lange schön aussehen.

## 2. AKTIVIERENDES GEL MIT GUARANA

Unterstützt die Blut-Mikrozirkulation, wodurch die Haut besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Wirkt antiseptisch und entzündungshemmend.

## 3. PFLEGENDES KÖRPERÖL

Das pflegende Öl ist für Massagen geeignet und spendet der Haut Feuchtigkeit. Die Haut wird gepflegt und spürbar gestrafft.

Produkt	Index	Inhalt	Verpackungsmenge je Karton
① Regenerierender Pflegebalsam für trockene Haut	SE-231-T250-212	250 ml	12
② Aktivierendes Gel mit Guarana	SE-231-T250-222	250 ml	12
③ Pflegendes Körperöl	SE-231-B150-242	150 ml	12

# WIRKSAMER SCHUTZ



Eines der wesentlichen Elemente bei der Vorbeugung von Dekubitus und Schürfwunden bei kranken Personen ist die Minimalisierung der Entzündungsgefahr. Um die gefährdeten Stellen zu schützen, sollte man pflegende Cremes (z.B. nach der Reinigung der Haut und an intimen Stellen) vor dem Gebrauch des Inkontinenzproduktes verwenden.




Die pflegenden Cremes von Seni Care schützen wirksam und neutralisieren den Uringeruch. **SINODOR®**

## 1. SCHUTZCREME MIT ZINKOXID

Schützt die Haut vor Mazeration und vor reizenden Substanzen. Hinterlässt eine weiße Schutzschicht auf der Haut.

## 2. SCHUTZCREME MIT ARGININ

Wirkt lindernd bei Reizungen oder Hautspannungen und reduziert das unangenehme Trockenheitsgefühl. Hinterlässt eine durchsichtige Schutzschicht auf der Haut.

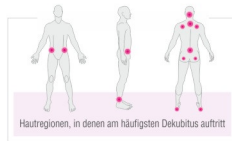

Produkt	Index	Inhalt	Verpackungsmenge je Karton
① Schutzcreme mit Zinkoxid	SE-231-T200-312	200 ml	12
② Schutzcreme mit Arginin	SE-231-T200-322	200 ml	12





## Zusatzangebot

Produkte, die die Pflege von Menschen mit Inkontinenz erleichtern



### Schutzservietten

- Aus saugfähigem und reißfestem Zellstofftissue gefertigt, mit praktischer Auffangschale
- Ideal zur Nahrungsaufnahme, Gesichtspflege oder Rasur von pflegebedürftigen Personen



### Hygienetücher Air-Laid

- Hygienetücher zum Einmalgebrauch, empfohlen zur Anwendung bei allen Pflegeaktivitäten
- Ideal zur Reinigung der Haut und zum Auftragen oder Abwischen von Körperpflegeprodukten, da besonders weich und sehr reißfest



### Waschhandschuhe

- Praktische Waschhandschuhe zur hygienischen Körperreinigung von pflegebedürftigen Personen



Waschhandschuhe aus Zellstoff mit Folienbeschichtung im Inneren



Waschhandschuhe aus Vliesstoff ohne Folienbeschichtung im Inneren



Produkt	Index	Inhalt	Verpackungsmenge je Karton
Schutzservietten (40 cm x 60 cm)	SE-981-S010-001	10	60
	SE-981-SLIN-001	100	6
Hygienetücher Air-Laid (36 cm x 32 cm)	SE-981-SC30-001	30	24
Waschhandschuhe mit Folie (22,5 cm x 16 cm)	SE-981-MYJK-001	50	18
Waschhandschuhe ohne Folie (22,5 cm x 16 cm)	SE-981-MYJK-002	50	12

# Die Wahl des richtigen Inkontinenzproduktes

## 1 Bestimmen Sie den Schweregrad der Inkontinenz

Harninkontinenz wird nach den Urinmengen, die in einem Zeitraum von 4 Stunden abgehen, in Schweregrade eingeteilt. Beobachten Sie einige Tage wie oft es zum Harnerverlust kommt und wie viel Urin unkontrolliert abgeht. Markieren Sie den passenden Schweregrad:

 <p><b>LEICHTE INKONTINENZ</b> gelegentlicher Urinverlust zwischen den Toilettenbesuchen</p> <input type="checkbox"/>	 <p><b>MITTLERE INKONTINENZ</b> regelmäßiger und starker Urinverlust</p> <input type="checkbox"/>	 <p><b>SCHWERE INKONTINENZ</b> regelmäßiger, starker und unkontrollierter Urinverlust</p> <input type="checkbox"/>	<p>Liegt auch Stuhlinkontinenz vor?</p> <p>JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/></p>
---	--	---	--

## 2 Bestimmen Sie die körperliche Verfassung des Betroffenen

 <p><b>MOBIL</b> Bewegt sich selbstständig, führt ein aktives Leben</p> <input type="checkbox"/>	 <p><b>BEDINGT MOBIL</b> Bewegt sich in einem Rollstuhl oder mit einer Gehhilfe</p> <input type="checkbox"/>	 <p><b>NICHT MOBIL, BETTLÄGERIG</b></p> <input type="checkbox"/>
---	---	---

## 3 Wählen Sie die passende Produktgröße

Messen Sie mit einem Maßband den Taillen- und Hüftumfang und vergleichen Sie die Werte mit der Größentabelle.



Beispiel: Super Seni Inkontinenzhosen


























Finden sich Taillen- und Hüftumfang im gleichen Größenbereich, wählen Sie die Größe folgendermaßen aus:

Finden sich Taillen- und Hüftumfang in zwei verschiedenen Größenbereichen, wählen Sie die Größe anhand des höheren Wertes:

 <p>TAILLE: 92 HÜFTE: 104</p> <p><b>Medium</b> Passende Größe</p>	 <p>TAILLE: 97 HÜFTE: 120</p> <p><b>Large</b> Passende Größe</p>
---	---

Inkontinenzslips		Inkontinenzhosen		Inkontinenzvorlagen mit Hüftbund	
Maße in cm	Größe	Maße in cm	Größe	Maße in cm	Größe
55-85	Small	40-60	(0) Extra Small	60-85	Small
80-110	Medium	55-80	(1) Small	70-105	Medium
100-135	Large	75-110	(2) Medium	80-125	Large
120-160	Extra Large	100-150	(3) Large	105-155	Extra Large
140-190	ZX-Large	130-170	(4) Extra Large		
		160-210	ZX-Large		

# Atmungsaktive Produkte für jede Inkontinenzstufe

	MOBIL ODER BEDINGT MOBIL	NICHT MOBIL, BETTLÄGERIG	
LEICHT	 		
MITTEL	 		
	 	 	
SCHWER	 <p>MOBIL</p>	 <p>BEDINGT MOBIL</p>	 <p>NICHT MOBIL, BETTLÄGERIG</p>
			
			
			
			

**Achtung!** Vor Gebrauch das Produkt aktivieren



Seni Lady Seni Control	
Seni Man	
Normal, Extra	
Super	
Seni Active Normal Seni Active Super Seni Active Plus Seni Active Classic	
Seni Soft Super Dry Seni Soft Super Seni Soft Normal Seni Soft Basic	
40 x 60 60 x 60 90 x 60	
90 x 60 + Seitenflügel	

San Seni Seni V San Seni Alvi San Seni for Men San Seni Basic	
Seni Kids	
Super Seni Super Seni Plus Super Seni Trio Super Seni Quatro Seni Classic Seni Classic Plus Seni Classic Trio Seni Standard Air Seni Standard Plus Air	
Seni Optima Seni Optima Plus Seni Optima Trio	

Seit dem Jahr 1951...

TZMO SA

Unsere wichtigsten Marken

**seni® seni®**  
care

Absorbentienmittel und Hautpflegeprodukte  
für Inkontinenz

**bella**

Damenhygieneprodukte

**Happy**

Babywindeln  
und Pflegeprodukte

**matopat**

Medizinprodukte  
und Geräte

TZMO SA ist ein weltweit tätiger Hersteller und Lieferant von Medizin-, Pflege- und Hygieneprodukten. Unsere Produkte sind in über 80 Ländern in Europa, Afrika, Nord- und Südamerika und Ostasien erhältlich. Das weltweit agierende Unternehmen erreicht mit insgesamt 15 verschiedenen Marken und 56 Gesellschaften knapp ein Drittel der Weltbevölkerung.



Andere TZMO-Marken

**CITO**

**MAX**

**eva**

**d**

**eva**

**bella**

**N°1**

**OPTUS**

**K**

**simple**

**TRICOMED**

**TRICOMED**

**matopat**

Qualität • Professionalität • Verantwortung

Unterstützung der Sozialprojekte liegt uns sehr am Herzen



Wir realisieren verschiedene nationale und internationale Bildungsinitiativen, weil wir überzeugt sind, dass Bildungswesen der Schlüssel zum Erfolg ist.



Seit 1998 organisiert TZMO Gruppe die Internationale Konferenz der Langzeitpflege in Torun. Sie ermöglicht über 1000 Teilnehmern aus der ganzen Welt, den Austausch von Erfahrungen, Diskussionen über Modelle und Standards der Langzeitpflege in verschiedenen Ländern sowie die gemeinsame Suche nach neuen Lösungen.

Gewöhnliches für ungewöhnliche Menschen...

**seni**

Seni Cup ist ein internationales Fußballturnier für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, das seit 2001 von der TZMO Unternehmensgruppe organisiert wird.

Seni Cup ist in jeder Hinsicht einzigartig

In dem Turnier geht es um das Überwinden von Grenzen:

- Altersgrenzen – an dem Turnier kann jeder teilnehmen, egal ob jung oder alt.
- Sprachgrenzen – die Spieler kommen aus verschiedenen Ländern Europas.
- Grenzen des eigenen Körpers – jeder einzelne Spieler beweist bei dem Turnier, dass eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung kein Hindernis ist, ein Hobby zu haben und Träume zu erfüllen.







## seni® Produktübersicht

1	2	2.5	3	4	4.5	5	6
SEN LADY	SEN LADY	SEN LADY	SEN LADY	SEN LADY	SEN LADY	SEN LADY	SEN LADY
MICRO	MINI	MINI PLUS	NORMAL	EXTRA	EXTRA PLUS	SUPER	PLUS
		SEN MAN		SEN MAN			SEN MAN
		NORMAL		EXTRA			SUPER
		SEN CONTROL		SEN CONTROL		SEN CONTROL	SEN CONTROL
		MINI		NORMAL		EXTRA	PLUS

4	5	5.5	6	7	8	9
SEN SENI	SEN SENI	SEN SENI	SEN SENI	SEN SENI	SEN SENI	SEN SENI
PRIMA	NORMAL	REGULAR	LUXE	MAXI	PLUS	PLUS EXTRA
			SUPER SENI	SUPER SENI PLUS	SUPER SENI TRO	SUPER SENI QUATRO
			XS S M L XL	XS S M L XL 2XS	S M L XL	S M L XL
			SEN OPTIMA	SEN OPTIMA PLUS	SEN OPTIMA TRO	
			M L XL	M L XL	M L XL	
		SEN ACTIVE NORMAL	SEN ACTIVE SUPER	SEN ACTIVE PLUS		
		S M L XL	S M L XL	S M L XL 2XL		
		SEN ACTIVE CLASSIC				
		S M L XL				
SEN SENI BASIC	SEN SENI BASIC			SEN SENI BASIC		
PRIMA	NORMAL			MAXI		
				SEN CLASSIC	SEN CLASSIC PLUS	SEN CLASSIC TRO
				S M L XL	S M L XL	M L XL
				SEN STANDARD AIR	SEN STANDARD PLUS AIR	
				S M L XL	S M L XL	

SEN SENI FOR MEN	SEN KIDS	SEN SENI ALVI	SEN V	SEN SOFT SUPER DRY / SEN SOFT SUPER	SEN SOFT NORMAL / SEN SOFT BASIC
	JUNIOR EXTRA		NORMAL SOFT	40 x 60 50 x 60 60 x 60 90 x 90 mit Seneflügen	40 x 60 50 x 60 90 x 60
SEN FIX	GERUCHS- NEUTRALISATOR	KOMFORT DER PFLEGE ZUSATZANGEBOT	SEN CARE PFLEGEPRODUKTE		